

VIANDOLift®/VIANDOLift® mobil



HEALTH CARE
Made in Germany



Ein Mehr an Möglichkeiten

	Konzept	Seite 5	
	Aktivieren und Mobilität erhalten	Seite 6 – 7	
		Seite 8 – 9	Pflegeoptimierung 
	Funktionen	Seite 10 – 11	
		Seite 12 – 19	Ausstattung und Zubehör 
	Hygiene und Bezugsmaterialien	Seite 20 – 21	
		Seite 22 – 23	Bezugsmaterialien und Farbauswahl 
	Brandschutz	Seite 24 – 25	
		Seite 26 – 27	Qualität 
	Maße	Seite 28 – 29	
		Seite 30 – 31	Lieferung und Service 
	Ökologie	Seite 32 – 33	
		Seite 34 – 35	Warum, wer, wo? 

VIANDOlift®/VIANDOlift® mobil

Lieber ein Produkt, das alles kann als zu viel Produktauswahl!

Gesundes, bequemes und funktionales Sitzen in nur einem Sessel vereint!

Der VIANDOlift®-Hebesessel verfügt über eine Vielzahl an Zubehörteilen, die flexibel einsetzbar sind und gleichzeitig den Sessel für verschiedene Personen und Krankheitsbilder individualisieren. Er passt einfach zu jedem!

Für jedes Alter und alle Körpergrößen, von der Geburtsklinik bis zur Geriatrie, von Pflegegrad 1 bis 5.

Einer für alle und alles in einem.

VIANDOlift® ist Made in Germany und eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marke der KRANICHconcept GmbH.

kurz & bündig

- alles in einem
- einfach zu bedienen
- ein Maximum an Flexibilität
- eine Vielzahl an Zubehör
- maßgeschneidert für diverse Krankheitsbilder
- passend von Pflegegrad 1 – 5
- für jedes Alter

Der passt zu Ihnen

VIANDOlift®/VIANDOlift® mobil Aktivieren und Mobilität erhalten



Leichter am



Selbstständigkeit erhalten

Unser höhenverstellbarer Hebesessel VIANDOlift® unterstützt und fördert in jedem Lebensstadium die verbliebenen eigenen Fähigkeiten. Patienten bewahren ihr persönliches Maximum an Selbstständigkeit und werden so für den Heilungsprozess aktiv motiviert.

Dank der Fernbedienung können Sie als Nutzer die verschiedenen Funktionen des Pflegesessels einfach und selbstständig steuern, ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Sie können den Sessel an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, ihn stufenlos in die gewünschte Sitz- oder Liegeposition bringen und auf die gewünschte Sitzhöhe anpassen. Auch lange Beine kommen hier auf ihre Kosten, indem Sie den Sessel einfach an die jeweilige Beinlänge anpassen. Stellen Sie den Sessel höher, um den Transfer ins Bett zu erleichtern. Ohne Klingeln und Warten.

Teilhabe am sozialen Leben

Der VIANDOlift® mobil macht seine Nutzer mobil. Sie werden mühelos im Sessel zu Mahlzeiten und gemeinsamen Aktivitäten gerollt, statt erst in einen Rollstuhl umgesetzt werden zu müssen. Beste Voraussetzungen, um aktiv am sozialen Leben teilzuhaben und persönliche Zuwendung durch zeitlich und körperlich entlastete Pflegekräfte zu erhalten.

Pflege mit Würde

Ein schönes Möbel liefert den perfekten Rahmen für einen würdevollen Auftritt. Dieses Gefühl von Normalität wirkt sich messbar positiv auf Pflegealltag und Heilungsprozess aus.

kurz & bündig

- Erhalt von Selbstständigkeit
- Förderung eigener Fähigkeiten
- Steigerung der Mobilität und Flexibilität
- Teilhabe am sozialen Leben
- Wahrung der Würde
- Optimierung von Heilungsprozessen

Leben teilnehmen

VIANDOlift®/VIANDOlift® mobil Pflegeoptimierung





Der Hebesessel VIANDOLift® liefert die ideale Verstärkung für Ihr Pflorgeteam. Er übernimmt hier eine tragende Rolle, ist überaus belastbar, rund um die Uhr einsatzbereit und dabei hochqualifiziert. Ob Sitzen, Liegen oder Hoch- und Runterfahren, ob Transfer in Rollstuhl oder Bett, der Hebesessel VIANDOLift® erspart Zeit und Kosten und dem Pflorgeteam vor allem vielfältige körperliche Belastungen.

Gewinnen Sie Zeit und Kraft durch die motorische Höhenverstellung und bringen Sie Ihren Patienten auf „Augenhöhe“. Ergonomisches Arbeiten in entspannter Haltung.

Durch das innovative Stecksystem und die Möglichkeit, einzelne Module zu entfernen, bekommen Sie einen einfachen und direkten Zugang zum Patienten und können um ein Vielfaches ergonomischer arbeiten.

Beim VIANDOLift® mobil wird Pflegekräften wie Patienten zusätzlich durch die Rollstuhlfunktion die körperliche Anstrengung beim Umsetzen in einen Rollstuhl erspart. Und wer nicht von der Patientenklingsel zu jedem Umsetzen, Positionieren oder anderen Handreichungen herbeigerufen wird, gewinnt Freiräume für persönliche Zuwendung. Kurz: für alle ein Gewinn!

kurz & bündig

- ergonomisches Arbeiten in entspannter Haltung
- körperliche Entlastung
- Zeitersparnis
- Motivationssteigerung
- Optimierung des Pflegealltags

Für alle ein Gewinn


VIANDOlift®/VIANDOlift® mobil

Funktionen

VIANDOlift®



VIANDOlift® mobil

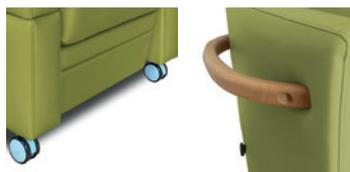



Die Unterstützung, die Menschen in unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen und -status benötigen, variiert. Darauf stellt sich der Hebesessel VIANDOLift® je nach Einsatzort und Anforderung ein.

Motorische Verstellbarkeit

Der ruhige, vibrationsarme Motor übernimmt die separate und stufenlose Verstellung von Beinauflage und Rückenlehne. Die Sesselemente können punktgenau positioniert werden bis hin zur Liegefläche in Herz-Waage-Lage (mit Fußkeilkissen). Die Beinauflage kann so die Venen entlasten und für eine optimale Regeneration der Beine wie des gesamten Körpers sorgen.

Bei der Verstellung der Sitzhöhe wird der Sessel bis zur gewünschten Höhe angehoben und ermöglicht damit das problemlose Erreichen von höher gelegenen Bereichen. So können Sie einfacher an Gegenstände in der Nähe des Sessels gelangen. Auch das Umsetzen auf höher gestellte Möbel wird erheblich erleichtert. Die Hebefunktion ermöglicht es Ihnen auch, die Sitzhöhe an Ihre individuellen Bedürfnissen anzupassen. Dies kann insbesondere für Personen mit längeren Beinen von Vorteil sein.

Gleichzeitig bringen Sie Ihren Patienten auf Augenhöhe und können bequem und ergonomisch arbeiten.

Rollstuhlfunktion und breite Armlehnen

(beim VIANDOLift® mobil)

Gummierte Bodenrollen und ein handlicher Schiebebügel verleihen dem Sessel leichtgängige Mobilität. Patienten können komfortabel fortbewegt werden, wobei die geschwächte Rumpfmuskulatur anders als im Rollstuhl ergonomisch gestützt und ein Zusammensinken verhindert wird. Die breiten Armlehnen des VIANDOLift® mobil bieten eine zusätzliche Ablagefläche. So haben Sie die Dinge des alltäglichen Gebrauchs in Griffweite. Technische Änderungen, Aktualisierungen und Farbabweichungen vorbehalten.


Technische Änderungen, Aktualisierungen und Farbabweichungen vorbehalten.

kurz & bündig

- ergonomisch sitzen und entspannen
- Sitzhöhe an die Beinlänge anpassen
- schonend liegen und regenerieren
- einfach hoch- und runterfahren
- Kreislauf stabilisieren
- therapieren und pflegen
- Aktivität erhalten
- Heilungsprozess fördern
- Rollstuhlfunktion und breite Armlehnen (beim VIANDOLift® mobil)

Für Patienten viel bewegen

VIANDOlift®/VIANDOlift® mobil Ausstattung und Zubehör

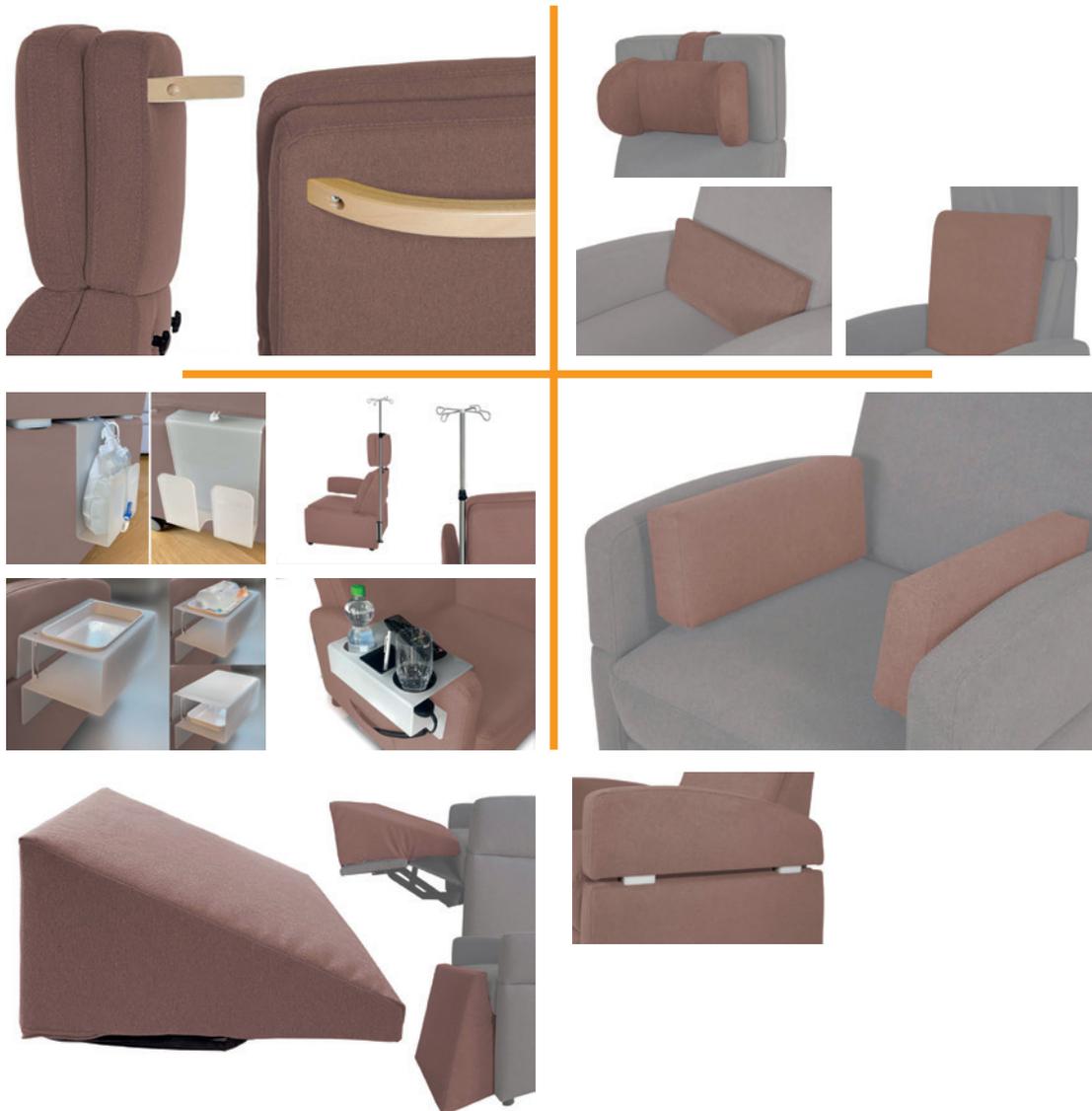



Damit Nutzer mit unterschiedlicher Größe und Statur optimale Unterstützung erhalten, kommt ihnen VIANDOlift® in jeder Hinsicht entgegen, mit höhenverstellbaren Nackenkissen, mit oder ohne Kopfstützen, oder Armlehnen-Erhöhen. Mit verschiedenen Ausstattungs-Varianten und umfangreichem Zubehör passt er sich den diversen Aufgaben im Tagesverlauf genauso flexibel an, wie den speziellen Anforderungen ganz unterschiedlicher Krankheitsbilder:

Stütz- und Therapiekissen

Ob es gilt, die Rumpfmuskulatur zu stabilisieren, Lordose-, Nacken- oder Kniebereich zu entlasten oder die Rücken-Unterstützungsfläche zu erweitern – unsere speziell entwickelten Stütz- und Therapiekissen sorgen für optimalen Halt, Stabilität und Entlastung bei geschwächter Muskulatur. In verschiedenen Varianten sind sie maßgeschneidert für jeden Einsatzzweck.

Taschen und Utensilios

Eine Vielzahl kluger Extras hält für Patienten alles in Reichweite und ermöglicht so den eigenständigen Zugriff auf Getränke oder Medien. Auch Utensilien-Taschen und USB-Anschluss machen den VIANDOlift® zum persönlichen Butler, der alles Gewünschte zur Hand hat.

Von XS bis XL

Damit Nutzer mit unterschiedlicher Größe und Statur optimale Unterstützung erhalten, kommt ihnen VIANDOlift® in jeder Hinsicht entgegen, mit Kopfstützen im Steckprinzip, höhenverstellbaren Nackenkissen oder Armlehnen-Erhöhen. Darüber hinaus ist er bis 150 kg Gewicht belastbar und motorisch voll einsatzfähig.

kurz & bündig

- Funktions- und Stützkissen
- Utensilien-Taschen
- Utensilien-Halter
- Armlehnen-Erhöhen
- USB-Anschluss



Ganz individuell

Ausstattung wählen

Individuelles Zubehör

Besondere Eigenschaften

Folgenden finden Sie eine Übersicht der wählbaren Ausstattung sowie das erhältliche Zubehör für grundlegende Pflegeunterstützung, die den VIANDOLift®-Hebesessel auszeichnen.

Diese Ausstattungen stehen zur Auswahl



VIANDOLift® – mit Höhenverstellung & motorischer Verstellbarkeit

In dieser Ausstattungsvariante lassen sich Beinauflage und Rückenlehne von einem ruhig und vibrationsarm arbeitenden Motor stufenlos und getrennt voneinander verstellen. Millimetergenau sind die Sesselemente in Position zu bringen, der tiefste Punkt entspricht mithilfe des Fußkeilkissens der Herz-Waage-Lage (0-Lage). Mit der motorischen Höhenverstellung wird der Sessel stufenlos nach oben und unten gefahren.



VIANDOLift® mobil – zusätzlich mit Rollen & breiten Armlehnen

Dieses Modell verfügt zusätzlich über Rollen, so dass man den Sessel bequem im Raum verschieben kann, sowie breitere Armlehnen. Diese können als zusätzliche Ablagefläche genutzt werden.



Akku

Der Akku ermöglicht einen kabellosen Betrieb der motorischen Verstellbarkeit und Höhenverstellung. Ohne störendes Kabel entfallen Stolperfallen, und die motorgetriebenen Funktionen sind an jedem Ort nutzbar.



USB-Anschluss

Der USB-Anschluss versorgt in Ergänzung zum Akku technische Geräte mit der nötigen Energie. So können Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte auch ohne Steckdose in Reichweite geladen und benutzt werden. Er befindet sich an der äußeren Seite der Armlehnen-Wange und ist bequem im Sitzen zu erreichen.



Air-Massage & Lordosstütze

Durchblutungsförderndes, elektro-pneumatisches Massage-System in der Rückenlehne mit Intervallprogramm. Zeitweilig auch als individuell dosierbare Lordose-Stütze nutzbar.



Wärmesystem im Rückenbereich

Muskelentspannendes Wärme-System in der Rückenlehne in zwei Heizstufen, Bedienung per Knopfdruck

Zubehör – zur individuellen Konfiguration



Armlehnen-Erhöhung

Mithilfe der Armlehnen-Erhöhdungen lässt sich der VIANDOlift® individuell an die Körpergröße anpassen. Das 4er-Set besteht aus Erhöhdungen mit 2 cm und 3 cm. So können die Armlehnen um bis zu 5 cm erhöht werden.



Fußkeilkissen

zum Erreichen der Herz-Waage-Lage. Befestigung per Klettverschluss.



Multifunktions-Keilkissen

Das Multifunktions-Keilkissen dient nicht nur zierlichen Personen zur Verringerungen der Sitztiefe. Auch andere Nutzer profitieren von der Optimierung der Unterstützungsfläche am Rücken und als Abpolsterung unter den Knien. Nicht zuletzt hilft es beim aufrechteren Sitzen.



Multifunktions-Keilkissen mit Schlaufen

mit Schlaufen am Stecksystem der Kopfstütze fixierbar; hält Kissen auch bei geneigter Liegefunktion in Position



Funktionskissen

Vielfältig einsetzbar zur Lordose-Unterstützung, im Nackenbereich, als Abpolsterung unter den Knien oder wo sonst zusätzliche Unterstützungsfläche gebraucht wird.



Stützkissen 2er Set

Die seitlichen Stützkissen werden zwischen Becken und Armlehne verwendet und dienen der seitlichen Positionierung und Stütze. Die Rumpfmuskulatur wird so stabilisiert.



Kopfstütz-Kissen für das Kopfteil

Für mehr Stabilität und ein intensiveres Gefühl von Geborgenheit ist das Kopfstütz-Kissen ein ideales Zubehör. Durch ein sinnvolles Gegengewicht ist es an beliebiger Stelle der Rückenlehne positionierbar.



Nackenkissen für das Kopfteil

Durch ein Gegengewicht an beliebiger Stelle der Rückenlehne positionierbar. Es kommt dort zum Einsatz, wo es gebraucht wird.



Halterung für Utensilien (nur bei VIANDOlift®)

Alles an einem Platz und ohne Bücken zu erreichen. Ob als Ablage für ein Getränk, Fernbedienung, Telefon/Handy oder eine Brille. Die Utensilien-Halterung wird auf die gepolsterten Armlehnen aufgesteckt und bewahrt alles sicher und schnell zu Hand.



Multifunktions-Ablage (nur bei VIANDOlift®)

Aufsteckbare Spezialablage aus satiniertem Acryl mit abnehmbarer Schale. Diese kann mit Infusions-Material o.ä. vorbereitet, zum Patienten-Sessel gebracht und dort griffbereit in die Mulde der oberen Ablage-Ebene gesetzt werden. Nach Verwendung lässt sich die Schale eine Ebene tiefer unterbringen und macht so die per Deckel verschlossene obere Ebene als Schreib- oder Ablagefläche nutzbar.



Halterung für Urinbeutel (nur bei VIANDOlift®)

Für die sichere und hygienische Platzierung von Urinbeuteln konzipierter Halter in S-Form aus satiniertem Acryl. Der Schlauch lässt sich unter der abnehmbaren Lehne hindurchführen, der Halter mit Beutel auf die Lehne aufstecken. Eine passgenaue Aussparung nimmt das Ventil auf, Distanzstücke verhindern, dass der Schlauch gedrückt wird.



Große Utensilien-Tasche

Immer alles dabei und doch dezent verpackt. Die große Tasche im selben Bezugsmaterial gefertigt, wie der Sessel selbst, dient der Aufbewahrung von Zubehör und Kissen. Die Tasche wird an der Rückseite des Sessels befestigt. So ist alles stets in Griffweite und schnell einsetzbar.



Seitliche Utensilien-Tasche

Klein und unauffällig in selben Bezugsmaterial wie der Sessel gearbeitet, bewahrt die seitliche Tasche persönlichen Dinge wie Zeitschriften, Brille oder Fernbedienungen auf. Alles ist rasch zu Hand.

Einzigartig – die besonderen Eigenschaften



Geringes Sitzgefälle

Das geringe Sitzgefälle von VIANDOLift® erleichtert auch ohne Motor das Aufstehen. Geschwächte Muskulatur wird durch kleinste Bewegungen aktiviert und mobilisiert. Langes Sitzen ist so weniger ermüdend, und körperliches Zusammensacken wird vermieden.



Innovatives Stecksystem

Das von Pflegeexperten bevorzugte Stecksystem erleichtert Pflegeanwendungen und Positionswechsel. Die Armlehnen und die Kopfstütze lassen sich unkompliziert und vollständig entfernen. Beim robusten und wartungsfreien Stecksystem von VIANDOLift® ist nichts im Weg, was den Bewegungsradius einschränken könnte.



Kopfteil höhenverstellbar und abnehmbar

Individuelle Unterstützungsfläche für große Persönlichkeiten. Das Kopfteil ist millimeter-genau auf die Größe der sitzenden Person anpassbar. Und dank des VIANDOLift® Stecksystems ist es vollständig zu entfernen, wenn therapeutische und pflegerische Anwendungen einen ungehinderten Zugang zu Kopf und Nacken erfordern.




Rollen & Schiebegriff (nur beim VIANDOLift® mobil)

Mit den am VIANDOLift® mobil vorhandenen Rollen lässt sich dieser Hebesessel leicht dort hinschieben, wo er gebraucht wird. Ob zum Tisch oder Treppenlift, zum Bett oder Bad, der Sessel bringt seine Nutzer mühelos vor Ort und erspart ihnen kraftraubende Positionswechsel. Für seine optimierten Maße sind Standardtüren ebenso wenig ein Hindernis wie enge Winkel. Wenn nötig, dreht er auf dem Punkt.



Leise Motoren und ruhige, vibrationsarme Mechanik

Viele Krankheitsbilder gehen häufig mit Ängsten einher, daher ist der Einsatz von Technik notwendig, die Stabilität und Ruhe vermittelt. Die im VIANDOLift® verbaute Technik ist stets auf dem neusten Stand und bewährt sich in Geriatrischen Kliniken, Onkologien, Tagespflegeeinrichtungen und in der privaten Pflege. Made in Germany – Qualität, die sich auszahlt.

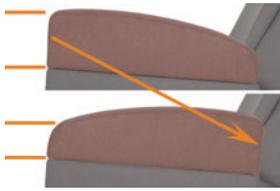

Armlehnen sind vielfach nutzbar

Das innovative Steckprinzip erlaubt ein Umstecken der Armlehnen. Die flachere, hintere Seite der Armlehnen lässt sich mühelos nach vorne umsetzen. So ist z.B. das „Unterfahren“ eines flacheren Tisches problemlos möglich.



Armlehnen gepolstert mit festem Kern

Eine Erkenntnis aus der aktivierend-therapeutischen Pflege. Die Armlehnen müssen Haltgeben, dürfen aber nicht zu fest und glatt sein. Vielmehr ist eine weiche und anschmiegsame Unterstützungsfläche der Arme wichtig, um Irritationen der Haut und der Gefäße zu vermeiden. Beim Aufstehen oder Abstützen wiederum ist eine stabile und feste Unterstützungsfläche unerlässlich, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.



Gerundete Armlehnen

Ergonomisch und durchdacht sind die nach hinten gerundeten Armlehnen. In jeder Position der verstellbaren Rückenlehne werden auf diese Weise die Arme gehalten und gestützt. Das irritierende Gefühl, dass die Unterarme wegrutschen und keinen Halt haben, kann nicht aufkommen.



Bezugsmaterialien sind zertifiziert

Die von uns verarbeiteten Bezugsmaterialien sind für das Gesundheitswesen entwickelt und zertifiziert. Die hohen Anforderungen an Hygiene und Brandschutz im Krankenhausbetrieb werden nachweislich erfüllt. Zudem sind die Bezugsmaterialien auf alle gängigen Desinfektionsmittel getestet. Eine entsprechende Liste der getesteten Desinfektionsmittel stellen wir gerne zur Verfügung.



Große Auswahl an Bezugsmaterialien

Wir bieten eine große Auswahl an Bezugsmaterialien und Farben in den jeweiligen Qualitäten an. Die Textilien DELIUS DELIGARD Tiba und Fellini werden dabei überwiegend in der Tagespflege und im privaten Umfeld eingesetzt. Sie sind besonders pflegeleicht und wirken einem Wärmestau entgegen. Das Kunstleder Malaga ist das bevorzugte Material im Klinikeinsatz. Es lässt sich besonders leicht reinigen und desinfizieren.



Nutzerfreundliche Fernbedienung

Pflegeexperten raten zu nachvollziehbaren Funktionen und einfacher, intuitiver Bedienbarkeit bei Hilfsmitteln. Der VIANDOLIFT® verfügt daher über eine leicht zu betätigende Fernbedienung mit sechs großen und schnell nachgebenden Tasten. Weniger ist manchmal mehr.



Fernbedienung dort, wo Sie sie brauchen

Die Fernbedienung des Sessels ist mitsamt ihrem Anschlusskabel standardmäßig in einer Tasche vorstehend links angebracht, d.h. auf der linken Seite, wenn man vor dem Sessel steht. Für Linkshänder oder bei Lähmungen der rechten Seite kann der Anschluss auch auf der rechten Seite angebracht werden. Bitte bereits bei Bestellung angeben.



Individuell, ganz nach Ihren Wünschen

Dank Herstellung der VIANDOlift®-Sessel in Deutschland können wir auf Ihre speziellen Wünsche eingehen. Individuelle Anpassungen für Kleinserien lassen wir gern für Sie fertigen, sprechen Sie uns bei Bedarf einfach unverbindlich an.



Made in Germany – 5 Jahre Garantie

Qualität made in Germany. Da können wir mehr tun als unsere Mitbewerber. Für unsere privaten Kunden bieten wir zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung weitere 3 Jahre Garantie für Polsterung, Unterfederung, Gestelle und Gestellteile sowie nicht bewegliche tragende Bauteile.



Wohlfühl und Geborgenheit beginnen beim Design

Bei Möbeln, in denen Menschen viel Zeit verbringen, ist Funktionalität nicht alles. Wenn ein Pflegesessel ein wichtiger Bestandteil des Alltags ist, muss er zum bisherigen Umfeld passen. Schönes Design fühlt sich gut an und lässt den Pflegeaspekt zeitweilig vergessen.



Professioneller Vor-Ort-Service

Im Reparaturfall wird der Sessel fachgerecht von geschulten Profis mit Originalteilen repariert. Keine Abholung, kein wochenlanger Verzicht auf den Hebesessel. Den professionellen Service eines Meisterbetriebes vor Ort überall in Deutschland ermöglicht POS Polster-Service.

VIANDOLift®/VIANDOLift® mobil Hygiene und Bezugsmaterialien



DELIUS
DELIGARD safe & clean Kollektion
Bezugstoff Tiba



DELIUS
DELIGARD safe & clean Kollektion
Bezugstoff Fellini



Höpke
Kunstleder Malaga



Hornschuch Stolzenau
skai Parotega NF





Hygiene ist in allen Bereichen unseres Lebens ein zentrales Thema, macht aber im Gesundheits- und Pflegebereich einen besonders hohen Standard unverzichtbar.

So entspricht der für den professionellen Klinik-Einsatz konzipierte Sessel VIANDOlift® in allen Aspekten den strengen gesetzlichen Hygiene-Vorgaben.

Alle verwendeten Bezugsmaterialien sind in vollem Umfang blut- und urinbeständig und werden von Desinfektionsmitteln nicht angegriffen. Das im klinischen Bereich bevorzugt eingesetzte Kunstleder Malaga der Firma Höpke Möbelsstoff-Handels GmbH ist mit porenlos glatter Oberfläche genauso antibakteriell, keimdicht und schimmelpilzhemmend wie die Textilien der DELIUS safe & clean Kollektion. Die bei beiden Bezügen produktgegebene Verhinderung von Keimwachstum vergrößert die erforderlichen Desinfektionsintervalle.

Dabei verbinden alle Oberflächen des VIANDOlift® Hygiene auf Klinikstandard mit wohnlicher, schmeichelnder Optik und Haptik. Eine in jeder Hinsicht gesunde Kombination.

(*)Auf Anfrage auch mit Kunstleder skai Parotega lieferbar.


kurz & bündig

- speziell für das Gesundheitswesen entwickelt
- nässe- und schmutzresistent
- wasserundurchlässig
- getestete Desinfektionsbeständigkeit
- Keimwachstum wird verhindert
- senkt Desinfektionsmittel-Verbrauch

Klinisch rein mit Sicherheit

VIANDOlift®/VIANDOlift® mobil

Bezugsmaterialien und Farbauswahl

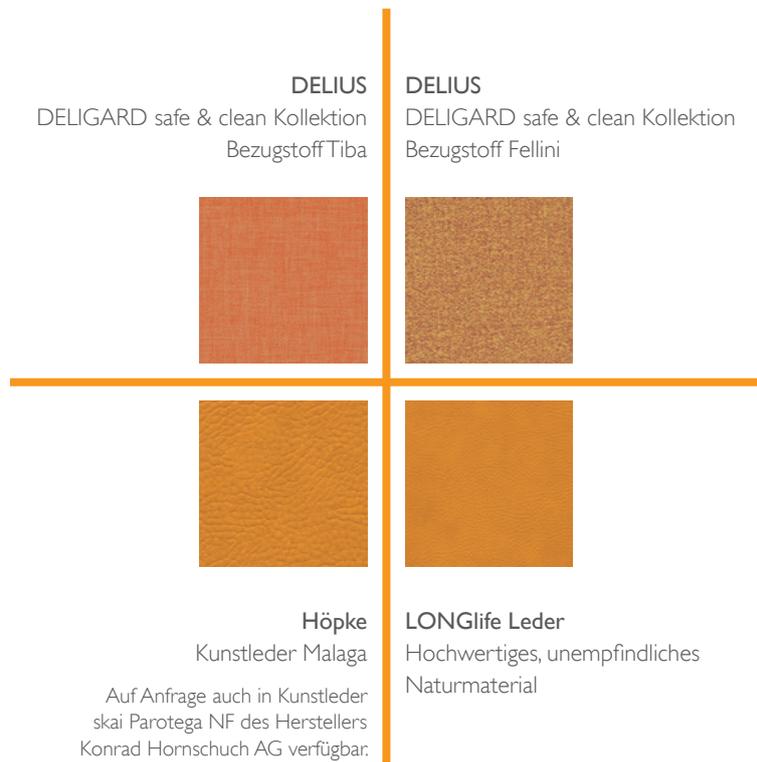



Tiba DELIGARD

Tiba ist ein Flachgewebe mit angenehm glatter Oberfläche und wohnlicher Haptik aus der Kollektion DELIGARD safe & clean des Herstellers DELIUS Textiles GmbH. Das Material ist pflegeleicht und fleckenunempfindlich.



Fellini DELIGARD

Tiba ist ein hochfloriges, samtiges Gewebe für erhöhte Rutschfestigkeit aus der Kollektion DELIGARD safe & clean des Herstellers DELIUS Textiles GmbH. Das Material ist pflegeleicht und fleckenunempfindlich.



Kunstleder Malaga

Die naturgetreue Optik und Haptik aus der Kollektion Malaga NF des Herstellers Höpke Möbelstoff-Handels GmbH ist von Echtleder kaum zu unterscheiden.

Auf Anfrage auch in Kunstleder skai Parotega NF des Herstellers Konrad Hornschuch AG verfügbar.



LONGlife Leder

Das wertige und unempfindliche Naturmaterial ist atmungsaktiv und nimmt die Körpertemperatur des Sitzenden rasch an. Die Haptik des Leders ist angenehm weich und hautschmeichelnd. Zudem ist es natürlich langlebig und besitzt sehr gute Pflegeeigenschaften.



VIANDOlift®/VIANDOlift® mobil Brandschutz



Polsterschäume
schwerentflammbar nach DIN EN 102

Feuer und Flamme



Mit dem VIANDOlift® sind Sie auch beim Brandschutz auf der sicheren Seite. Seine Bezugsmaterialien, Stoffe, Kunstleder und Schäume erfüllen alle Kriterien für den Objekt- und Pflegebereich im vollem Umfang und sind entsprechend zertifiziert Sicherheit durch permanente Schwerentflammbarkeit, die es ermöglicht auch bei diesem heißen Thema kühl zu kalkulieren.

Delius-Bezugsstoffe

Unsere textilen Bezüge stammen aus der DELIGARD safe & clean Kollektion von DELIUS, dem deutschen Marktführer für permanent schwer entflammbare Objekttextilien. Der chemische Aufbau ihres Polyestergewebes gewährleistet dauerhafte Schwerentflammbarkeit nach DIN EN 1021 und BS 5852.

Malaga-Kunstleder


Das für VIANDOlift® verpolsterte Kunstleder Malaga aus dem Sortiment der Firma Höpke Möbelstoff-Handels GmbH verbindet eine klassische Lederoptik und -haptik in naturgetreuer Narbung .

kurz & bündig

- Bezug DELIUS DELIGARD safe & clean schwerentflammbar nach DIN EN 1021 1+2 und BS5852 Crib 5
- Bezug Malaga schwerentflammbar nach DIN EN 1021 -1+2 und BS 5852 Source 0+1
- Polsterschäume schwerentflammbar nach DIN EN 102

für Ihre Sicherheit

VIANDOlift®/VIANDOlift® mobil Qualität

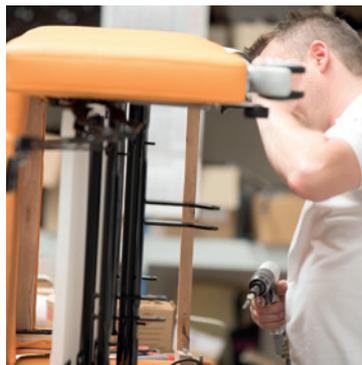

Qualität ist kein Zufall



Auf Qualität und Langlebigkeit des VIANDOlift® können Sie vertrauen. Entwickelt, gestaltet und produziert in Deutschland, steht er für handwerkliche Präzision, hohen Komfort und Langlebigkeit.

Dabei entspricht jedes Bauteil und Material dem Anspruch, den das Prädikat „Made in Germany“ impliziert – wie etwa die erstklassigen Lithium-Ionen-Akkus, mit denen sich die motorische Verstellung des VIANDOlift® rund eine Woche lang kabellos bedienen lässt. Auch für die Bezüge verpolstern wir ausschließlich deutsche Qualität der Höpke Möbelsstoff-Handels GmbH und der DELIUS GmbH & Co. KG, beide Marktführer in ihren jeweiligen Disziplinen.

Qualität ist kein Zufall. Wir wollen, dass Sie und Ihre Patienten in puncto Pflegemöbel bei uns in besten Händen sind.

kurz & bündig

- Made in Germany
- hochwertige Bauteile
- handwerkliche Perfektion
- Bezugsmaterial von Marktführern
- umfangreiche Qualitätssicherung
- Langlebigkeit

– Made in Germany

VIANDOlift®/VIANDOlift® mobil Maße



VIANDOlift®



VIANDOlift® mobil





Die 67 cm hohen Armauflagen unseres VIANDOlift® erleichtern das Umsetzen, indem sie ihren Nutzern entscheidende Zentimeter entgegenkommen. Zusätzlich können Sie den Sessel durch die stufenlose Verstellmöglichkeit auf jede gewünschte Höhe (minimal 49 bis maximal 77 cm) heben und sich somit entweder bequem umsetzen oder aufstehen. Auch für die Pflegekräfte ist mit dem VIANDOlift® ein komfortables, ergonomisches Arbeiten möglich.

Größe demonstriert er auch in Ruhelage und Liegeposition. Der VIANDOlift® verfügt über eine komfortable Beinauflage, die stufenlos verstellbar ist. Die Beine liegen bequem auf, die Venen werden entlastet und können genau wie die Muskulatur regenerieren

So ist der VIANDOlift® Maß für Maß durchdacht und kommt gleichermaßen Nutzer als auch Pflegekraft entgegen.

Bitte beachten Sie, dass im Polstermöbelbereich produktionsbedingte Maßabweichungen von +/-2 cm möglich sind. Diese Abweichungen liegen innerhalb der branchenüblichen Toleranzen und stellen keinen Mangel dar.

kurz & bündig

- stufenlos höhenverstellbar von minimal 49 cm bis maximal 77 cm
- Armlehnen in Komforthöhe
- bequemes Umsetzen
- schonendes ergonomisches Arbeiten am Patienten
- komfortable Beinauflage
- Herz-Waage-Lage mit Fußkeilkissen

Passt immer und überall

VIANDOLift®/VIANDOLift® mobil Lieferung und Service





Unter der Devise „Und das web wird regional“ bekommen Sie bei uns ein Mehr an Leistung und das von Mensch zu Mensch. Wir begleiten Sie mit Rat und Tat auf dem Weg zu VIANDOlift®, der exakt für Ihre Verwendungszwecke konfiguriert ist, stellen ihn einsatzbereit bei Ihnen auf und kümmern uns unverzüglich, sollte er irgendwann einmal seinen Dienst versagen.

Lieferung an Ort und Stelle

Wir konfrontieren Sie weder mit Montage-Anleitungen noch mit Verpackungsmüll. Unser Qualitätsprodukt kommt fix und fertig montiert und sofort funktionstüchtig direkt zu Ihnen. Und „direkt“ meint in den fünften Stock statt nur bis zur Bordsteinkante. Ein geschulter Zwei-Mann-Lieferservice unserer hauseigenen Spedition platziert den Pflegesessel genau dort, wo er gebraucht wird und nimmt die schützende Folienverpackung gleich wieder mit.

Reparatur Soforthilfe

VIANDOlift® bleibt für Sie jederzeit einsatzbereit. Sollte es einmal zu einer Beschädigung oder einem Funktionsausfall kommen, regeln wir das schnell und zuverlässig an Ort und Stelle. Dort wird der Sessel von den Profis eines Meisterbetriebes mit Originalteilen repariert. Mehrwert den wir in Kooperation mit POS, dem deutschlandweit agierenden Full-Service-Spezialisten für fachgerechte Vor-Ort-Reparatur von Möbeln realisieren. Und der Ihnen Abholung und Verzicht auf den Pflegesessel erspart.

kurz & bündig

- endmontiert und sofort einsatzbereit

Innerhalb Deutschlands

- versandkostenfreie Lieferung durch geschultes Team der hauseigenen Spedition
- Platzierung direkt am Wunschort hinter der I. verschlossenen Tür
- Full-Service-Reparatur vor Ort
- Ausland und Deutsche Inseln
Preis auf Anfrage.

Das nehmen wir persönlich

VIANDOlift®/VIANDOlift® mobil Ökologie





VIANDOlift® tut nicht nur Ihren Patienten sondern auch der Umwelt gut. Unser Pflegesessel ist mit durchweg hochwertigen Materialien und Qualität Made in Germany bestens ausgestattet für ein langes Produktleben, entspricht in jeder Hinsicht den strengen deutschen und europäischen Richtlinien und kommt dazu mit minimaler Verpackung und kurzen Transportwegen aus. Durchweg positive Bilanz für Nutzer wie für das Ökosystem.

Schadstoffminimierung

In Verantwortung für Mensch und Umwelt verwenden wir ausschließlich gesundheitlich unbedenkliche Produkte. Dafür kooperieren wir mit Partnern, die in Deutschland produzieren und den hiesigen Richtlinien zu Imprägnierung, Färbung und Brandschutzbehandlung verpflichtet sind. Darüber hinaus verzichten DELIUS und Höpke freiwillig auf erlaubte, aber nicht für alle Menschen problemfreie Substanzen wie Formaldehyd oder das Flammschutzmittel Decabromdiphenylether.

Kurze Transportwege

Der VIANDOlift® wird in Deutschland gefertigt und von unserer hauseigenen Spedition europaweit ausgeliefert. Weder Bauteile noch das fertige Möbel sind auf den Transport per Flugzeug angewiesen und ersparen der Umwelt somit unnötige CO₂-Belastung.

Kein Verpackungsmüll

Fachleute liefern das fertig montierte Möbel direkt an den Einsatzort. So fallen keine Kartonagen oder Euro-Paletten als unerwünschtes Beiwerk an. Der Polstersessel wird lediglich mit einer Folie vor Verschmutzung auf dem Transportweg geschützt – und die können Sie unserem Team gern wieder mitgeben.

kurz & bündig

- Verzicht auf AZO-Farben
- kein Einsatz von Decabromdiphenylether (DecaBDE)
- Formaldehyd frei
- kein Einsatz von Polychlorierten Biphenylen (PCB)
- FCKW frei
- umweltschonende Verpackung

Mit gutem Gewissen

VIANDOlift®/VIANDOlift® mobil

Warum, wer, wo?



Transparent hinter



Von wem?

VIANDOLift® ist eine Entwicklung der KRANICHconcept GmbH in Zusammenarbeit mit der Deutschen Fachgesellschaft für Aktivierend-therapeutische Pflege e.V. (DGATP und den Hamburger Pflege-Instruktoren der BIKA® e.V.

Björn Kranich war bei der eigenen, biografisch motivierten Suche nach einem universal einsetzbaren Pflegesessel erfolglos. Daraufhin beschloss er, als Einrichtungsexperte über Jahrzehnte im Hochwertbereich tätig, diese Lücke im Care-Bereich mit einem innovativen Qualitätsmöbel zu schließen, das Design mit Flexibilität und einem Maximum an Funktion verbindet.

VIANDOLift® ist eine patentrechtlich geschützte Marke der KRANICHconcept GmbH und zählt gemeinsam mit weiteren Produkten zum fachspezifischen Segment KRANICHcare des Familienunternehmens aus Hamburg.

Warum?

„Beim VIANDOLift®-Sessel wurde sehr vorausschauend gedacht, und so bietet er nicht nur kranken und alten Menschen viel Komfort, sondern ist auch für pflegende Angehörige oder Pflegepersonal dank der hohen Funktionalität eine enorme Entlastung.“

*Dirk W. Rosenkranz, Vorstandsvorsitzender
Deutsche Muskelschwundhilfe und Betroffener*

kurz & bündig

Wer?

Beispiele für Krankheitsbilder, bei denen VIANDOLift® unterstützt

- Parkinson
- Muskelschwäche
- Herzinfarkte
- Lähmungen
- ALS
- Alzheimer / Demenz
- Unfälle

Wo?

Beispiele für Einsatzbereiche des VIANDOLift®

- Geriatrien
- Früh-Reha-Kliniken
- Onkologien
- Palliativ-Stationen
- Diakonien
- Tageskliniken
- Senioren-Residenzen
- Betreutes Wohnen
- Stroke-Units
- Geburtskliniken
- Augenkliniken

helfen beim helfen



KRANICHconcept GmbH
Holtenslinker Str. 11
21029 Hamburg
t +49 (0)40 2282 127 20
info@kranich-care.de
www.kranich-care.de
<https://kranich-care.de/hebesessel/>

VIANDOLift® Broschüre 2025-4